



व्हेटर्नरी डायग्नोस्टिक सेंटर
अचूक निष्कर्ष; प्राण्यांचा उत्कर्ष



LK Vet Care Pvt. Ltd.
॥ पशुसंपन्नतार्थम् तंत्रोपासना ॥



यशस्वी रक्त संक्रमणासाठी
उपयुक्त ब्लड ट्रान्सफ्यूजन
किट, सर्व सामग्री, औषधे
आणि प्रक्रियेसह...

रक्त संक्रमणासाठी ब्लड ट्रान्सफ्यूजन टेस्ट किट

ब्लड ट्रान्सफ्यूजन टेस्ट किट परिचय :

गंभीर अॅनिमिया ही एक अशी स्थिती आहे जिथे गुरांसारख्या शेतातील प्राण्यांचे रक्त खूप कमकुवत असते, कारण रक्तातील प्रोटोझोआ इन्फेक्शन जसे की थेलेरिओसिस, बेबेसिओसिस, अॅनाप्लाज्मोसिस, इक्टो आणि एंडो पॅरासाइट, शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्त कमी होणे किंवा पौष्टिक आहाराची कमतरता असणे. जेव्हा असे होते तेव्हा रक्तातील ऑक्सिजन वाहून नेण्याची क्षमता अत्यंत कमी होते, यामुळे प्राणी दगावले जाण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मोठ्या प्राण्यांमध्ये रक्त संक्रमणासाठी ब्लड ट्रान्सफ्यूजन किट तयार करण्यात आले आहे.

वैशिष्ट्ये :



अनुकूलता चाचणी: डोनर- रेसिपीएन्ट यांच्या
रक्त प्रकारातील सुसंगतता निर्धारित करते.



कमी जोखीम: रक्त संक्रमणाच्या संबंधित
जटिल गुंता गुंत होण्याचा धोका कमी करते.



जलद परिणाम: रक्त संक्रमणाचे अचूक परिणाम,
निष्कर्ष जलद देण्यास मदत करते.



विश्वसनीय: रक्त संक्रमण दरम्यान प्रतिकूल
प्रतिक्रिया टाळण्यासाठी मदत करते.

फायदे :



गुरांसाठी सुसंगत रक्त संक्रमण सुनिश्चित करून
प्रतिकूल प्रतिक्रियांना प्रतिबंध करते.



तात्काळीन प्रकरणांसाठी
त्वरित अनुकूलता चाचणी सक्षम करते.



जुळून येत नसण्याच्या रक्त संक्रमणाशी संबंधित
जोखीम कमी करून गुरांचे चांगले आरोग्य राहते.



रक्त संक्रमण प्रक्रियेचे उच्च परिणाम
देतात आणि यश दर सुधारते.

एका चाचणी किट मध्ये अभिकर्मक आणि साहित्यासह खालील गोष्टींचा समावेश आहे :



ब्लड कलेक्शन बॅग



इड सेट (फिल्टरसह) २



सिरिज (१० मिली) २




अल्कोहोल स्वॅब्स २



१६ गेज निडल्स २



स्लाइड होल्डर

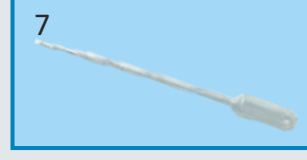

पिपेट ड्रॉपर



हँड ग्लोव्हज

इतर उपयुक्त माहिती :

प्रथम रक्त संक्रमण सामान्यतः गुरांमध्ये रक्ताची जुळणी न करता लागू करणे सुरक्षित असू शकते.

क्रॉस मॅचिंग :

रक्त संक्रमण पूर्वी मेजर क्रॉस मॅचिंग करावे लागते.

मेजर क्रॉस मॅचिंग :

मेजर क्रॉस मॅच रेसिपीएन्टच्या प्लाझ्मामध्ये आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या अँटीबॉडीज शोधते ज्यामुळे डोनर RBC's रेसिपीएन्टचे रक्त संक्रमण होते तेव्हा हेमोलाइटिक प्रतिक्रिया होते (हे संवेदना विकसित होण्याची क्षमता शोधत नाही).

निष्कर्ष :

- रेसिपीएन्ट सीरम किंवा प्लाझ्मा + डोनर RBC's
- पॉझिटिव्ह टेस्ट: मॅक्रो किंवा माइक्रो एग्लुटिनेशन उपस्थित (प्रतिकूल)
- निगेटिव्ह टेस्ट: मॅक्रो किंवा माइक्रो एग्लुटिनेशन अनुपस्थित (अनुकूल)



Tap to Visit :

@ lkvetcare.in

@ info@lkvetcare.in

f pashulab



ब्लड ट्रान्सफ्युजन किट खरेदीसाठी - संपर्क: एलके व्हेट केअर प्रा. लि., ३ ए, रचना अॅव्हेन्यू, एफ सी रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे - 9552524949 **येथेही उपलब्ध :** ● पंढरपूर पशुलॅब: वक्रतुंड बिल्डिंग, केबीपी कॉलेज चौकाजवळ, वाखरी रोड, पंढरपूर - 8275206604 ● कामधेनु पशुलॅब: हर्षवर्धन कॉम्प्लेक्स, जत-सांगली रोड, डफळापूर - 992320996
● बारामती पशुलॅब: मोतानगर समोर, सूर्यनगरी, सिटी इन चौकाजवळ, MIDC, बारामती - 8297111213